

KaVo クアトロケアプラス 買替キャンペーン

キャンペーン
期 間 | 2025年 11月21日(金) ~ 2026年 1月20日(火)のご注文分まで

**LAST
CHANCE**

このたびKaVo クアトロケア/KaVo クアトロケアプラスの買い替えを対象とした「KaVo クアトロケアプラス買替キャンペーン」を**期間限定の特別価格**にてご提供いたします。

KaVo クアトロケアはすでに販売終了して10年以上経過しており、2026年1月31日(土)をもってサービスサポートを終了させていただくこととなりました。KaVo クアトロケアプラスに買い替えていただくことで、経年劣化による修理代を抑え、より経済的に適切なメンテナンスを行っていただくことができます。

ぜひ最後のチャンスをお見逃しなく、買い替えをご検討ください。

※買い替えていただいたクアトロケア/クアトロケアプラスは、クアトロケアプラスご購入後の修理対応は終了とさせていただきます。何卒ご了承ください。

手では除去しづらい 7ヶ所の汚れを 強力オイル洗浄

構造上汚れが付着しやすく、手では洗浄できない汚れを、強力な洗浄力で除去します。

シンプルで簡単な操作

省スペースで安全設計

小規模な診療室でも簡単設置。

適切なメンテナンスで ランニングコストを低減


製品寿命はその製品自体の品質だけではなく、メンテナンスの習慣によって決まります。定期的に洗浄と注油を行うことで、インスツルメントが故障を起こしにくくなり、修理・買い替えなどのランニングコストを軽減でき、経済的です。



オイル不足でローターが黒く焦げ付きチャック部分も破損

わずか2分で 強力・確実な オイル洗浄

短時間で効果的に汚れを落とせるのは、オイルがインスツルメント内部で泡状となり、高圧エアですみずみに行き渡るからです。1度に4本同時のオイル洗浄・注油がたった2分で行うことができます。

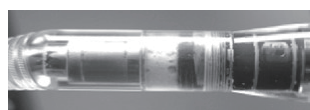

スプレーオイルがハンドピース内で30倍に拡張し、汚れを吹き飛ばします。



2025 KaVo QUATTROcare Plus Replacement Campaign



KaVo クアトロケアプラス

■外形寸法

幅	35cm
奥行き	28cm
高さ	38cm

■付属品

イントラマチックケアカプリング(コントラ用) 3本
マルチフレックスケアカプリング(タービン用) 1本
クアトロケアスプレープラス (1本)

■仕様

重量	10kg
電源	AC 100 - 240 V
電圧	50 - 60 Hz
消費電力	約24W
使用エア圧力	4 - 6 bar
消費エア流量	約50 NI/分

短時間で作業効率を高めるKaVoメンテナンス・滅菌システム

感染リスクの少ない診療環境がわずか20分

「患者さまを診察している間に洗浄・滅菌が完了する」
メンテナンス・滅菌サイクルづくりをKaVoはサポートします。



STOP!! 使いまわし



Washing-Time

外装部の洗浄

流水下で約1分間外装部を歯ブラシ等で洗浄します。60～70%のアルコール溶液に浸した柔らかい布で、外装部を拭き取ります。



QUATTRO-Time

内部オイル洗浄・注油

内部のオイル洗浄及び注油が2分間で完了します。



クアトロケアプラス 2124A



Steri-Time

滅菌

滅菌パックに入れて約10分間*で滅菌は終了します。

*滅菌パックモードで使用した場合



Ready-Time

保存

インスツルメントは新たに安心して使える状態になりました。滅菌パックに入れた状態で次の診療まで保管します。



※内部洗浄・消毒 (internal cleaning / internal disinfection) を行う場合は、ISO15883-1に準拠したMiele社の器具除染用消毒器 (ウォッシャーディスインフェクター) の使用を推奨しています。

オーダーシート ▶ FAX:03-6840-0906

貴医院名 (必ずご記入ください)	ご住所	
	TEL.	
お取引ディーラー名	ご担当者名	受付番号

製品番号	製品名	標準販売価格 (税別)	ご注文数
1.008.3805	クアトロケアプラス 2124A	302,000円	

買い替え製品 (対象製品を○で囲ってシリアル番号をご記入ください。)

クアトロケア / クアトロケアプラス (シリアルNo.)

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取引先ディーラー様までお問い合わせください。

KAVO
Dental Excellence

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)

<https://www.kavo.jp>

VITFJB2510V1-INS-154